

Administración del tratamiento MetaTherapy™ a través del sistema MetaNeb™



Enhancing outcomes for
patients and their caregivers:

Hill-Rom.

Expansión pulmonar, eliminación de secreciones y administración de aerosoles en un único ciclo de tratamiento

Tratamiento MetaTherapy

El tratamiento MetaTherapy maximiza la eficiencia para pacientes y médicos mediante la combinación de la expansión pulmonar, la eliminación de secreciones y la administración de aerosoles en un solo ciclo de terapia integrada. El uso puede reducir el tiempo del tratamiento a solo 10 minutos* y eliminar la necesidad de conectar otros dispositivos.

Afecciones que se pueden tratar con MetaTherapy

- Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)
- Manejo postoperatorio de las vías respiratorias
- Bronquiectasia
- Trastornos neuromusculares
- Fibrosis quística
- Asma
- Enfisema
- Reversión de atelectasia
- Traumatismo de la pared torácica

Opciones de administración


- Cánula nasal
- Boquilla
- Mascarilla facial
- Traqueotomía

Tratamiento MetaTherapy 3 en 1

1. Empiece con Presión Positiva Espiratoria Continua (CPEP) para reabrir las áreas pulmonares colapsadas.
2. Introduzca la terapia de Oscilación de Alta Frecuencia de la Pared Torácica (CHFO) inmediatamente después que los pulmones se hayan expandido mediante la Presión Positiva Espiratoria Continua (CPEP)
3. Integre la administración de medicaciones en aerosol para maximizar la eficiencia



* Los tiempos de tratamiento pueden variar dependiendo de las necesidades del paciente y de los tratamientos prescritos.

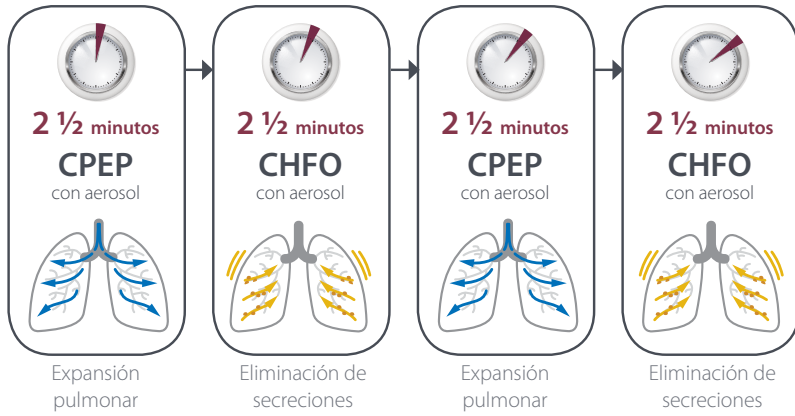

Tiempo total de 10 minutos*

Los ciclos alternos de CPEP y CHFO combinados con la administración de aerosoles ayudan a maximizar la eficacia terapéutica.

Atención sanitaria continua: del hospital al hogar

Los hospitales buscan soluciones de atención sanitaria ininterrumpidas que permitan sanar a los pacientes que se encuentran en entornos de atención para enfermedades agudas y asegurar que se mantienen sanos cuando regresan a su hogar. El sistema MetaNeb puede formar parte de esta solución junto con otra solución contrastada de Hill-Rom: el sistema de desobstrucción de las vías respiratorias Vest™. Tanto el sistema MetaNeb como el sistema de desobstrucción de las vías respiratorias Vest™ son terapias contrastadas para la desobstrucción de las vías respiratorias.



Referencia	Descripción	Producto
PMN4	Sistema MetaNeb 4.0	Incluye: controlador del sistema, soporte móvil, manguera de gases, 2 circuitos SPU y manual del usuario
Circuitos de uso en un solo paciente		
C2000N	Circuito SPU con nebulizador incluido	1 circuito
PC20005N	Circuito SPU con nebulizador incluido	5 circuitos/kit

1. Este informe fue preparado por Milliman el 16 de enero de 2012.

Hill-Rom es una empresa líder mundial en tecnología médica con más de 10.000 empleados en 100 países. Colaboramos con los proveedores de servicios sanitarios centrandos nuestros esfuerzos en soluciones de atención sanitaria que permitan mejorar los resultados clínicos y económicos en cinco áreas fundamentales: **fomento de la movilidad, cuidado y prevención de heridas, trabajo clínico, seguridad y eficacia quirúrgicas, y bienestar respiratorio.** Los empleados, programas y marcas de Hill-Rom tienen un objetivo: **mejorar los resultados clínicos de pacientes y profesionales sanitarios a diario y en todo el mundo.**



Hill-Rom mantiene un compromiso con el concepto de que la movilización temprana de los pacientes y la preservación de su independencia suponen una mejora en su calidad de vida, tanto en el hospital como en el hogar.

MetaNeb™ es una marca comercial de Comedica, Inc.

MetaTherapy™ es una marca comercial de Comedica, Inc.

The Vest™ es una marca comercial de Hill-Rom Services PTE Ltd.

Este documento está dirigido exclusivamente a profesionales de la salud. Los equipos médicos que se representan en el presente folleto están diseñados para su uso con pacientes en las unidades de los centros sanitarios.

Los equipos médicos son productos sanitarios regulados y que portan, de acuerdo con esta normativa, la marca CE. Hill-Rom le recomienda la lectura detenida de las instrucciones detalladas de seguridad así como la correcta utilización que figuran en los documentos incluidos junto con los equipos médicos. El personal de los centros sanitarios es responsable del uso y mantenimiento adecuados de estos equipos médicos.

Hill-Rom se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin previo aviso en el diseño, las especificaciones y los modelos. Hill-Rom ofrece únicamente una garantía expresa por escrito en relación con la venta o el alquiler de sus productos.

©2015 Hill-Rom Services, Inc. RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS.

N.º de documento: 5E5165304-01, 06 octubre 2015

No todos los productos/opciones están disponibles en todos los países. Para obtener más información sobre nuestros productos y servicios, póngase en contacto con su representante local de Hill-Rom o visite nuestra página web:

www.hill-rom.com

Enhancing outcomes for
patients and their caregivers:

Hill-Rom